

Oxivir Plus Spray 3,5%

Pesevä desinfektioaine

Kuvaus tuotteesta

Oxivir Plus Spray on käyttövalmis pesevä desinfektioaine, joka perustuu kiihdytetyn ja stabiloidun vetyperoksidin patentoituun teknologiaan. Tuote soveltuu lääkinnällisten välineiden ja laitteiden sekä vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfektioon. Lisäksi se soveltuu myös eritetahradesinfektioon.

Ominaisuudet

- Vetyperoksidipohjainen hapan peroksygeeni
- Laaja mikrobisidinen teho

Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
- Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa.
- Soveltuu laajasti erilaisten pintojen desinfioivaan puhdistukseen:
 - terveydenhuollon vaativissa kohteissa
 - kosteissa tiloissa
 - lämpimissä tiloissa
 - keittiötiloissa.
- Tavanomaisiin desinfektioaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyötäisempi.
- Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini). Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
- Mikrokuitupyyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
- Kestää likarasitusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
- Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
- Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
- Soveltuu tekstiilipintojen desinfioivaan puhdistukseen.

Käyttöohje

Käyttötarkoitus

Pintadesinfektio

Käytössä huomioitavaa

Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen / vaahtoon kostutetulla siivouspyyhkeellä tai suihkuta vaahto pinnoille ja kuivaa siivouspyyhkeellä. Käytä likaisuusasteesta riippuen joko kostea- tai märkäpyyhintää.


Eritetahradesinfektio

Levitä liuos / vaahto suoraan tahraan ja pyyhi tahra pois.

Tekstiilipintojen
desinfioiva
puhdistus

Poista irtolika tai erite. Annostele liuos / vaahto suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahrان keskustaa kohden. Imeytä liuennut tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhtelee lopuksi pinta vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.

CE
0088

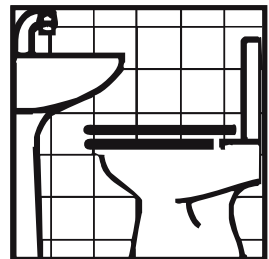

Oxivir Plus Spray 3,5%

Pesevä desinfectioaine

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	väritön neste
Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,0
pH-arvo, laimentamaton	1,8

Koostumus:

Hapteen perustuva desinfectointiaine (peroksygeeni)	< 5 %
Ionittomia pinta-aktiivisia aineita, anionisia pintaaktiivisia aineita, fosfonaattia, fosfaattia	< 5 %

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää marmoripinnoille.

Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa. Vain ammattikäyttöön. Turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot ks. käyttöturvallisuustiedote.

Varastointi:

Säilytä alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Suositeltavin säilytyslämpötila on + 6 - + 35 °C. Säilyvyys avattuna / avaamattomana 2 vuotta valmistuspäivästä.

Pakkauksessa mainittu viimeinen käyttöpäivä.

Käyttöturvallisuustiedotteet ja EN-testitulokset toimitetaan pyydettyäessä.

Hyväksynät

Teho viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.

Tuotteella on CE Ila -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkausko	Pakkausmuoto
100829234	6 x 0,75 l	spraypullo

