

# Sactiv Kloramiini

## Desinfioiva puhdistusaine

### Kuvaus tuotteesta

**Sactiv Kloramiini** on kehitetty välineiden ja pintojen desinfioivaan puhdistukseen sairaaloissa ja muissa korkeaa hygieniaa vaativissa kohteissa.

### Ominaisuudet

**Sactiv Kloramiini** puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti. Tuote on mikrobisidiseesti erittäin laajatehoinen. Poistaa tehokkaasti kosteissa tiloissa esiintyvää ihorasvaa.

### Edut

- Käyttäjä- ja materiaaliystävällinen alhaisen pH:n ansiosta.
- Ei valkaise materiaaleja tai pintoja.
- On perinteisiin kloorituotteisiin verrattuna lähes hajuton.

### Käyttöohje

#### Sairaalat

ppm	1 l käyttöliuosta	%	Huomioitavaa
Desinfioiva puhdistus 200 ppm	0,1 dl + 9,9 dl vettä	1 %	Ei huuhdella
Desinfioiva puhdistus 1000 ppm Eritetahradesinfektio 1000 ppm	0,5 dl + 9,5 dl vettä	5 %	Huuhdeltava, kun käytetään toistuvasti laajoille pinnoille (esim. epidemiatilanne). Eritetahradesinfektiossa ei huuhdella.
Eritetahradesinfektio 500 ppm	0,25 dl + 9,75 dl vettä	2,5 %	Ei huuhdella
Eritetahradesinfektio 5000 ppm	2,5 dl + 7,5 dl vettä	25 %	Ei huuhdella
Välinedesinfektio 5000 ppm	2,5, dl + 7,5 dl vettä	25 %	Liotusaika 1 tunti Välineet huuhdellaan
Elintarviketilojen lattiakaivot 5000 ppm	2,5, dl + 7,5 dl vettä	25 %	Huuhdellaan

Laimentamaton tuote sisältää 20 000 ppm.

### Tärkeää

Käytä suojakäsineitä.

Annostele **Sactiv Kloramiini** viileään veteen.

Älä käytä yhdessä happamien aineiden kanssa eikä kuumille pinnoille.



# Sactiv Kloramiini

## Tekniset tiedot

Ulkonäkö	väritön, hajustamaton neste
Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,08
pH-arvo, käyttöliuos	n. 9,0
pH-arvo, laimentamatta	n. 9,5

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannolle. Niitä ei tule käyttää spesifikaationa.

## Koostumus

Ionitonta pinta-aktiivista ainetta	< 5 %
Fosfaatteja	< 5 %
Desinfioivaa yhdistettä (kloramiini T)	5 -< 15 %

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Ohjeet tuotteen käsittelyyn ja hävittämiseen löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön. Varastoidaan alkuperäisessä pakkauksessa suljettuna ja lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

## Säilyvyys:

Käyttöliuos kuukauden, laimentamaton 12 kuukautta valmistuksesta.

## Ympäristötiedot

Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja. Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

## Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko	Pakkausmuoto
5828510	6 x 1 l	pullo
5828511	3 x 5 l	kannu (poistuu valikoimasta syksyllä 2009)
7516653	2 x 5 l	kannu (varastossa syksyllä 2009)

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Kaurakatu 48 B 20740 Turku  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4202  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)

**JohnsonDiversey (FIN)**  
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki  
Puh. 020 747 4200  
Faksi 020 747 4201  
[www.johnsondiverseyn.fi](http://www.johnsondiverseyn.fi)