

Suma Med Super LpH

Pesuaine sairaalavälineiden koneelliseen pesuun

Kuvaus tuotteesta

Suma Med Super LpH on heikosti emäksinen tiivistetty pesuneste, joka soveltuu erityyppisiin sairaalavälineiden pesu- ja desinfektiolaitteisiin.

Ominaisuudet

Suma Med Super LpH -pesuneste ei sisällä lipeää. Tuotteen pH on 10. Heikosti emäksisenä se soveltuu alumiinin ja muiden kevytmetallien puhdistukseen kaikenkovoisissa vesissä. Tuote soveltuu myös laboratoriovälineiden pesuun.

Suma Med Super LpH:n pesuteho on testattu hyvin tuloksin Kansanterveystieteen laitoksella.

Edut

- Sisältää mietoja emäksiä ja kompleksointiaineita, jotka takaavat hyvän pesutehon
- Soveltuu kaikenkovoisiin vesiin
- Matalan pH:n ansiosta ei syövytä alumiinia eikä muita kevytmetalleja
- Soveltuu käytettäväksi kaikissa pesu- ja desinfektiolaitteissa
- Estää kalkkisaostumien muodostumisen koneisiin

Käyttöohje

Suma Med Super LpH annostellaan pesu- ja desinfektiolaitteen automaattisen annostelulaitteen avulla. Suositeltava annostus on 2 - 3 g/l veden kovuuden ja laitteen käyttämän pesuveden määrän mukaan.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas neste
pH-arvo, 1-prosenttinen käyttöliuos	10,7
Suhteellinen tiheys (20 °C)	1,16

Yllä olevat tiedot ovat tyyppillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää spesifikaationa.

Koostumus:

Emäksiä	< 5 %
Kompleksinmuodostajia	5 - 15 %
Fosfaattia	5 - 15 %


Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. Ainoastaan ammattikäyttöön.

Säilytys alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Suma Med Super LpH sopii useimmille sairaaloissa tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeen mukaisesti. Ei saa käyttää kaikkein alkalikerkeimmille materiaaleille, kuten eloksidulle alumiinille.

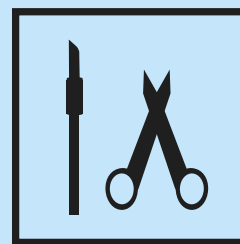

Suma Med Super LpH

Hyväksynät

Tuotteelle on myönnetty lääkintälaitedirektiivin (93/42/EEC) mukaisesti CE-merkki.

Ympäristötiedot

Muovipakkaukset ja -etiketit soveltuvat muovin kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön. Kontit ja tynnyrit voi palauttaa uudelleentäyttöä varten. Ulko- ja kartonkipakkaukset ovat kierrätettäviä, valmistettu valkaisemattomasta kuidusta ja sisältävät suurelta osin kierrätyskuituja.

Käytetyistä raaka-aineista sekä muista ympäristöön liittyvistä yksityiskohdista tarkemmin JohnsonDiverseyn Ympäristöperiaatteet-esitteessä.

Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko
7516615	2 x 5 l

JohnsonDiversey (FIN)
Kaurakatu 48 B 20740 Turku
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4202
www.johnsondiversey.fi

P01151FIFI-10

JohnsonDiversey (FIN)
Valuraudankuja 3 00700 Helsinki
Puh. 020 747 4200
Faksi 020 747 4201
www.johnsondiversey.fi

© Copyright 2009 JohnsonDiversey