



# Oxivir Excel® Wipe

## Pesevä desinfektiopyyhe myös lääkinnällisille laitteille

### Kuvaus tuotteesta

Oxivir Excel Wipe –pyyhe on kehitetty laajakirjoiseen, yksivaiheiseen desinfioivaan puhdistukseen. Tuotteen vaikutusaika on lyhyt ja sen teho perustuu patentoituun AHP-tekniikkaan (Accelerated Hydrogen Peroxide). Tuote soveltuu vettäasetäville kovalle pinoille sekä ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille (CEIIa).

### Ominaisuudet

- Tehoa bakteereihin, viruksiin ja hiivoihin. Desinfioi jopa 1 minuutissa. Turvallinen käyttäjälle ja pinoille. Käyttövalmis ja helppokäyttöinen. Hyvä pesuteho. Hajusteeton. Aktiivaineet hajoavat vedeksi ja hapeksi. Ei vaadi huuhtelua, kerrostumatonta.

### Edut

- Tuotteen teho on todistettu kattavasti EN-testein. Tehoa useisiin patogeeneihin mm. polio-, adeno- ja murine noro -viruksiin. Tehoa myös kaikkiin vaipallisiin viruksiin, kuten HI-, HB-, HC-, influenssa-, vaccinia- ja corona -viruksiin. Desinfektion toteutumiseen vaadittavat kontaktiajat ovat tällä tuotteella lyhyitä, näin desinfektio ehtii toteutua ennen pinnan kuivumista. Erinomainen puhdistuskyky. Turvallinen käyttää. Ei ärsytä silmiä eikä ihoa. AHP-koostumus on turvallinen pinoille. Soveltuu käytettäväksi myös terveydenhuollon korkean riskin kohteissa mukaan lukien leikkaussalit, teho-osastot ja potilashuoneet.

### Käyttöohje

Poista näkyvä lika. Avaa pyyhepakkaus, ota pakkauksesta yksi pyyhe ja sulje kansi. Pyyhi pinta ja anna kuivua. Ota uusi pyyhe, kun käytössä oleva pyyhe ei kostuta pintaa riittävästi, kun pinta on silminnähdyn likainen tai kun siirryt seuraavaan puhdistuskohteeseen.

### Tekniset tiedot

Ulkonäkö: valkoinen, polypropyleenistä valmistettu kertakäyttöpyyhe

Tuoksu: hajusteeton

pH-arvo (käyttövalmis): < 2.0

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.0001


Säilyvyys: 2 vuotta avaamattomana, 28 vrk avattuna

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Reagoi hapettuvien tuotteiden kanssa.

**Tärkeää:** Älä käytä muiden kemikaalien kanssa. Ei saa käyttää pinoille, jotka eivät siedä vettä tai happamia aineita (esim. marmori). Suosittelemme suojakäsineiden käyttöä, erityisesti pitkäaikaisessa käytössä.

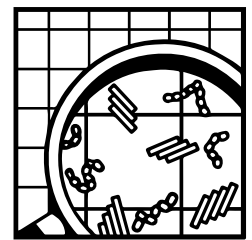

© A.I.S.E.



# Oxivir Excel® Wipe

## **Yhteensopivuus**

Oxivir Excel Wipe –pyyhe soveltuu käytettäväksi useimmille käytössä oleville materiaaleille suositelluissa käyttöolosuhteissa

## **Hyväksynät**

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIa -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

## **Ympäristötiedot**

Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin 648/2004 mukaisesti.