



# Klorilli

## Erikoisdesinfektioaine



Kloramin T-pohjainen desinfektioaine desinfiioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä veri- ja eritetahradesinfektioon.

### Käyttökohteet

Klorilli on orgaanista klooriyhdistettä sisältävä pesevä erikoisdesinfektioaine terveydenhoidon käyttöalueelle desinfiioivaan puhdistukseen, instrumentti- ja välinedesinfektioon sekä eritetahradesinfektioon myös eristystilanteissa. Ammattikäyttöön.

### Tuoteominaisuudet

Biosidisenä tehoaineena on nestemäinen kloramin T. Valmisteen sisältämä orgaaninen klooriyhdiste tuhoaa tehokkaasti bakteereja, viruksia ja sieniä. Tuotteella on erinomainen lianirrotuskyky. Korkea pH pitää klooriyhdisteen sidotussa muodossa, valmisteen hajuttomana ja säilyvyyden hyvänä. Orgaaninen materiaali, lika ja mikrobit saavat pH:n alenemaan ja kloorin vapautumaan.

Mikrobisidisen tehon tutkimukset: EN 13727 (bakteerit), EN 13624 (hiivat), EN 13697 (bakteerit ja fungit), EN 14476 (polio-, adeno- ja norovirus) – täysi virusidinen teho.

**Käyttö- ja annostusohje**

Tee käyttölaimennos puhtaaseen, viileään (+20°C) veteen. Mittaa vesi ja Klorilli. Noudata ohjeeksi annettuja liotusaikoja. Välineliotuksessa tee uusi käyttölaimennos 1-2 kertaa viikossa. Vaihda käytössä oleva liuos, mikäli se on näkyvästi likaista. Huuhtelee välineet viileällä vedellä.

Pintadesinfektiossa huuhtelu ei yleensä ole tarpeen käytettäessä 500 - 1000 ppm pitoisuuksia.

Puhdas käyttölaimennos säilyy 4 viikkoa suljetussa astiassa ja käytettäessä One System Basic pyyhepakkausta.

Välineiden/instrumenttien esidesinfektioon Klorilli Erikoisdesinfektioainetta suositellaan silloin, kun pesu desinfioivassa pesukoneessa viivästyy tai ei ole mahdollista. Tällöin instrumentit upotetaan liuokseen kauttaaltaan.

Klorillin käyttö- ja laimennusohjeet	ppm	%	Klorilli	Vesi	Vaikutus -aika	Huom!
Pintojen puhdistus ja desinfektio / pyyhintä (saniteetti- ja huoltotilat)	500 1000	3 5	30 ml 50 ml	9,7dl 9,5dl		
Eritetahradesinfektio	500- 1000 5000	3-5 25	30-50 ml 2,5 dl	9,7-9,5 dl 7,5 dl		2-vaiheinen 1-vaiheinen
Välinedesinfektio /upotus, eristys (pintapyyhintä)	5000	25	2,5 dl	7,5 dl	1 h	Huuhdellaan Pintapyyhinnässä vaikutusaika on työhön käytetty aika

**Huomioitavaa**

Käyttölaimennokset: Käytä erillisiä käyttölaimennospulloja ja -etikettejä. Merkitse etikettiin käyttölaimennoksen pitoisuus ja kelpoisuus aika.

Laimennusohjeita ja liotusaikoja noudattamalla, huolellisella huuhtomisella ja kuivaamisella minimoidaan korroosiovaikutuksia. Vältä roiskeita ja liian märkiä työskentelytapoja. Varmista, että käsiteltävä materiaali kestää kyseistä desinfektioainetta. Käytä asianmukaisia suojaimia.

**Koostumus**

Tehoaine		Vaikutus
Dinatriummetasilikaattia	< 5 %	korroosiosuoja
Klooriamiini T	5 - 15 %	biosidinen tehoaine

**Muu koostumus**

Aktiiviklooripitoisuus 2 % = 20 000 ppm

**Tuotteen pH**

13.1 vahvasti emäksinen

**Käyttöliuoksen pH**

12.0 vahvasti emäksinen

**Varastointi**

5 - 25°C, 2 v.

**Valmistusmaa**

SUOMI

**Käyttö- ja ympäristö-  
turvallisuus**

Klorilli erikoisdesinfektioaineeseen liittyvistä mahdollisista vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle asiakaspalvelu@kiilto.com ja lääkinnällisistä laitteista vastaavalle viranomaiselle (Suomessa Fimea).

Käytä biosidituotteita turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Tutustu käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Lue käyttö- ja suojausohjeet käyttöturvallisuustiedotteesta.

**Pakkauskoko /  
Tuotekoodi**

Myyntierä	Tuotekoodi	GTIN	Myyntierän GTIN
6 x 1 l	8109	6417964081091	6417964482461
3 x 5 l	8110	6417964081107	6417964482478

**Lisätietoja**

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiilto.com](mailto:asiakaspalvelu@kiilto.com).