



PINTADESINFEKTIO

# CLEANISEPT WIPES

DESINFEKTIOPYYHE



## Käyttöalue

Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeitä käytetään lääkinnällisten laitteiden ja välineiden pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin (MDD, luokka IIa). Pyyhkeet sopivat erinomaisesti käytettäväksi myös ultraäänilaitteiden antureiden desinfiointiin (mm. Siemens, Philips, GE, Shimadzu, SonoAce, Aloka).

## Ominaisuudet

Cleanisept Wipes desinfektiopyyhkeet ovat nukkaamatonta kuitukangasta. Mikrobisidisestä tehosta on saatavilla laajat tutkimustulokset (bakteerit, sienet (EN 13697), virukset (BVDV, vaccinia, Rota, Papova). Desinfektioaineisuus on pH:ltaan neutraali ja soveltuu myös herkille materiaaleille, esim. erilaiset muovit. Tuote on dermatologisesti testattu. Pakkaus sisältää 100 kpl rullasta repäistävää kertakäyttöistä kuitukangaspyyhettä, pyyhkeen koko 14 x 20 cm.

## Käyttöohje

Muovipakkaus sisältää suljetussa pussissa olevan pyyherullan. Leikkaa halkio pussin yläosaan ja pujota pyyherullan keskellä oleva pää muovipakkauksen kannessa olevan aukon läpi. Käyttötilanteessa pyyhe irtoaa rullasta helpoiten, kun vedät pyyhettä ulospäin ja samanaikaisesti painat toisella kädellä pakkauksen kantta kiinni. Pyyhi kontaminoitunut alue ja anna sen kuivua. Pinnan voi tarvittaessa kuivata, mikäli se on kostea vielä 1 min. jälkeen. Laita käytetty pyyhe roskiin. Desinfektioaineille herkimät materiaalit on suositeltavaa pyyhkiä päivittäin myös vedellä tai miedolla pesuaineella kostutetulla liinalla.

## Koostumus

Didecylmethylammoniumchlorid  
Alkylbenzylidimethylammoniumchlorid  
Alkylethylbenzylidimethylammoniumchlorid

## pH

Tuotteen pH 6,5

## Varastointi

Säilytettävä alle +28°C lämpötilassa. Säilyy 3 vuotta valmistusajankohdasta. Avattu pakkaus käytettävä 6 kk kuluessa. Sulje kansi aina käytön jälkeen. Avaamattoman pakkauksen säilyvyysaika sisäpakkauksessa.

## Valmistusmaa

Saksa, valmistaja Dr. Schumacher GmbH

## Käyttö- ja ympäristöturvallisuus

Materiaalit soveltuvat kierrätykseen. Raaka-aineet ovat ympäristömyönteisiä.

## Pakkauuskoko/ tuotekoodi

12 x 100 pyyhettä, muovipakkaus	8080	EAN 42600 6862189 0
12 x 100 pyyhettä, täyttöpakkaus	8085	EAN 42600 6862970 4

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme [www.kiiltoclean.fi](http://www.kiiltoclean.fi) tai asiakaspalvelustamme e-mail [asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi](mailto:asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi)

